

# AmpSnap® Ampulåbner



AmpSnap® passer til ampuller på 1-10 ml.




Begge ender kan anvendes.

## Instruktioner

AmpSnap® opfanger og indkapsler den skarpe ampulspids. Hermed beskyttes brugeren, og de normale risici forbundet med håndtering af ampulaffald elimineres. Mange åbner glasampuller med brugen af blot en vatpind eller gazebind og risikerer dermed at skære sig på de skarpe kanter.




Tryk den ene ende af AmpSnap® helt ned over ampulhalsen. Hvis der er markeret en brudlinje på ampullen, skal denne overholdes.

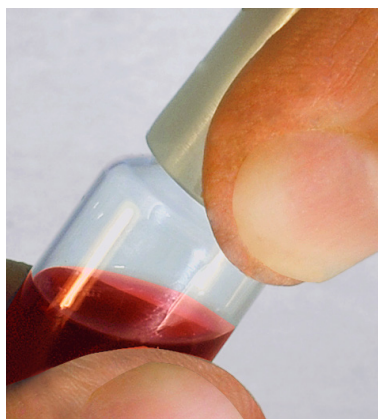

Hold AmpSnap® i et fast tohåndgreb og tving ampulspidsen i retning mod dig selv, indtil til den knækker af.

AmpSnap® bør også anvendes, når der kræves, at man starter bruddet med en fil.

Den svenskfremstillede AmpSnap® er produceret udelukkende af miljøvenlig PE

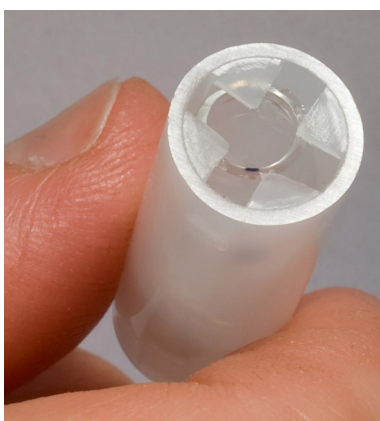

Den afbrækkede ampulspids er nu sikkert indkapslet i AmpSnap® og kan ikke forvolde skade.



AmpSnap® – giver et rent brud. Beskytter mod skarpe glaskanter.

**Ved brug af AmpSnap® reducerer du risikoen for snitsår ved åbning af ampuller.**

