

# AmpSnap® Ampulleåpner



AmpSnap® passer for ampuller fra 1-10 ml.




Begge ender kan brukes.


## Instruksjon

AmpSnap® fanger opp den skarpe ampulletuppen for å beskytte de som bruker den, og eliminere risikoen som er assosiert med å håndtere ampulleavfall.

Mange knekker bare ampullene av ved å bruke en kompress eller en bit gasbind som setter de i fare for å kutte seg selv på de skarpe kantene.

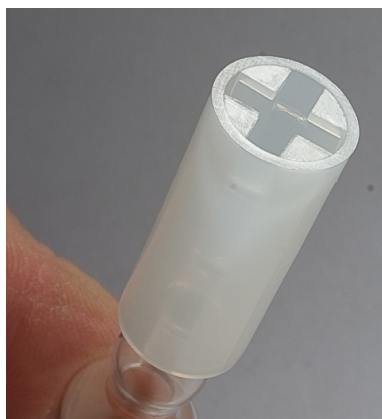


Press en av endene til AmpSnap® helt over ampulletuppen, og knekk av på linjen som er skåret, hvis den er der..

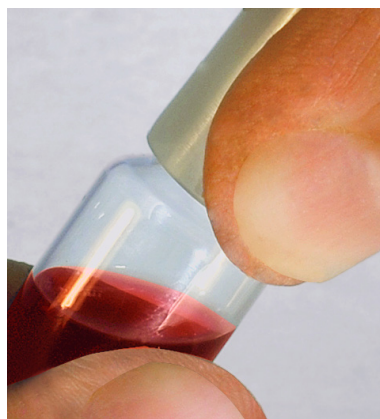

Hold AmpSnap® fast med «tohåndsgrep» og bend tuppen på ampullen mot deg til den knekker trygt av.

AmpSnap® bør også brukes dersom en fil er nødvendig til å forsiktig skjære rundt halsen på ampullen før den kan knekkes.

AmpSnap® er produsert i Sverige, og er laget av miljøvennlig PE (Polyetylen).

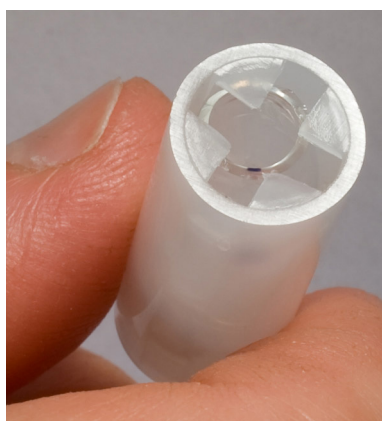

Den knekte ampulletuppen er nå trygt fanget inne i AmpSnap® for å forhindre skade.



AmpSnap®, for rene kutt. Beskytter mot skarpe og skadelige glasskår.

**Ved å bruke AmpSnap®, reduserer du risikoen for kutt når du åpner ampuller.**

